




Monteringsanvisning –

Sidostöd Basic för Netti III, Netti 4U CED, Netti 4U CE PLUS och Netti Mobile



5 mm insexnyckel

Montera fästet i önskad höjd på ryggstödsröret. Fixera båda skruvarna. För Netti-modellerna släpper du på banden på kardborreryggen och vrider ryggstöds materialet runt ryggstödsröret så att fästet glider på. Justera sedan banden igen. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att göra ett snitt i ryggstödsväven för att fästet ska passa. Alternativt kan du byta standard ryggen till en som är förberedd för bålstöd.

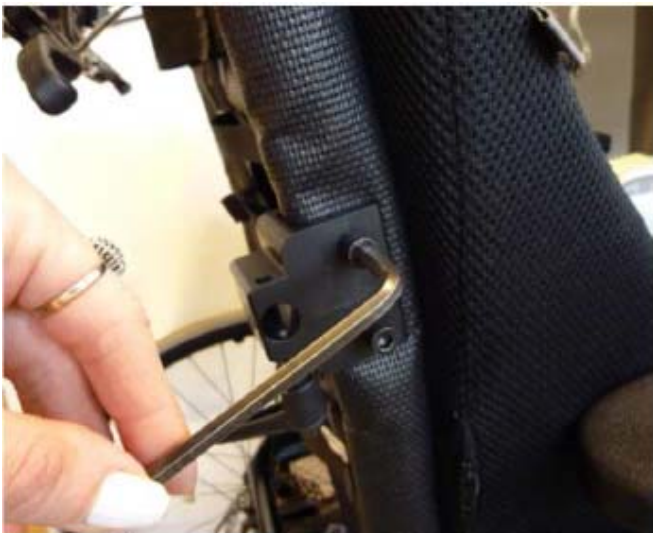

- Skjut sidostödet in i hålet på fästet och dra åt snabbskruven.
- För att justera sidostödslängden använd en insexnyckel och justera kudden.
- För att justera sidostödets sidoposition, släpp på snabbskruven och justera sidostödet. Dra sedan åt igen.

Denna monteringsanvisning tillsammans med övriga finns även på vår hemsida:

<http://www.my-netti.com/downloads/manuals>

