



Monteringsanvisning –

Sidostöd Korrektion för Netti III, Netti 4U CED, Netti 4U CE PLUS och Netti Mobile



5 mm insexnyckel

Montera adaptern i önskad höjd på ryggstödsröret. Fixera båda skruvarna. För Netti-modellerna släpper du på banden på kardborreryggen och vrider ryggstöds materialet runt ryggstödsröret så att fästet glider på. Justera sedan banden igen. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att göra ett snitt i ryggstödsväven för att fästet ska passa. Alternativt kan du byta standard ryggen till en som är förberedd för bålstöd.



- Skjut sidostödet in i hålet på fästet och dra åt spännskruven
- För att justera sidostödslängden använd en insexnyckel.
- För att justera sidostödets vinkel, använd en insexnyckel för att justera de fyra skruvarna på sidostödsplattan



För att justera sidostödets läge lossa klämskruven.
Lyft sidostödet rakt upp och sväng det sedan till önskat läge



Denna anvisning är en del av varje sidostöd och måste därför vidarebefordras till användaren eller vårdgivaren och bör lagras.

Denna monteringsanvisning tillsammans med övriga finns även på vår hemsida:

<http://www.my-netti.com/downloads/manuals>