



Monteringsanvisning – Sidostöd Stabil




6 mm insexnyckel

Sidostöd Stabil är ett bålstöd som främst används för att ge extra stöd till Netti ryggdynor. Det kan även användas separat.

1. Montering av Sidostöd stabil

- Skruva ur de två skruvar som håller ihop fästet. Öppna sedan fästet.
- Till rektangulära rör används den svarta plastutfyllnaden.

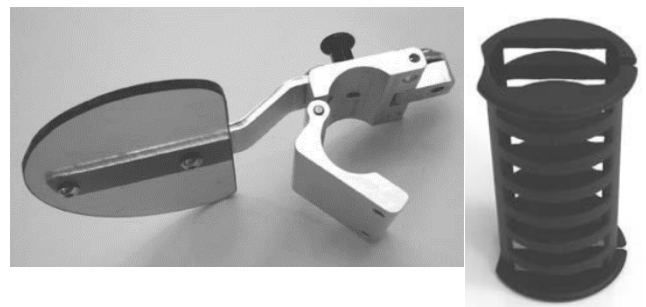

2. Vid användning av standard korborrygg

- Behöver det skäras i korborryggen. Hitta rätt position och skär sedan ett snitt där sidostödet ska sitta.
- Sätt dit plastutfyllnaden, om det är ett rektangulärt ryggrör. Sätt sedan dit fästet och dra åt skruvarna ordentligt.
- Vinkel på sidostödet kan justeras genom att vrida stödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna.




3. Vid användning av förberedd korborrygg

- Hitta rätt position.
- Sätt dit plastutfyllnaden, om det är ett rektangulärt ryggrör. Sätt sedan dit fästet och dra åt skruvarna ordentligt.
- Vinkel på sidostödet kan justeras genom att vrida stödet till önskad position. Dra sedan åt skruvarna.

4. För att släppa på sidostödet

- Dra i spärren och vrid bort sidostödet.

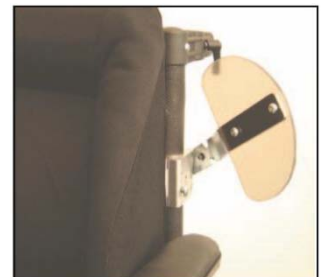

Denna monteringsanvisning tillsammans med övriga finns även på vår hemsida:

<http://www.my-netti.com/downloads/manuals>